


# SAMLEVEJLEDNING AF REDNINGSBÅRE

1. Tag båren ud af rygsækken og fold den ud.



2. Saml alu. rørene og sæt dem i de langsgående lommer.

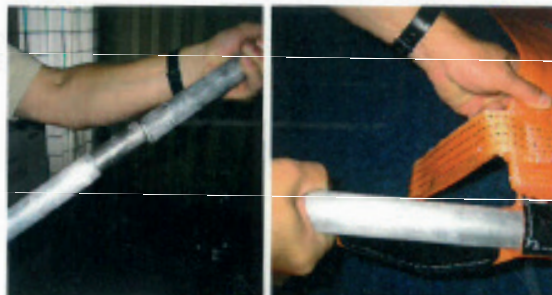

3. Læg patienten i båren med fødderne mod fodpladen og fikser fødderne med velcro stropperne.



4. Juster nakkestøtten og hættens så det passer til patientens længde.



5. Fastspænd patienten i længderetningen med skridtseleerne, som fastgøres over patientens skuldre.



6. Luk først det lille slag om patienten. Derefter det store slag med den oppustelige pose.

Patienten fastspændes med de fire tværgående bæltter.

Tag fat i rørene og træk båren op omkring patienten, hvorefter bæltterne efterspændes.



7. Patienten iføres neoprenhætten.

8. De tre oppustelige poser oppustes til fiksering af patient og opdrift i vand.

9. Sprayhooden trækkes over hovedet på patienten og den øverste luftpose og fastgøres under luftposen.

10. Båren er nu klar til løft i lodret position, vandret position eller i en vinkel på ca. 45 grader.

